

 医療機器の清掃・消耗部品の交換・保管方法に関する事項

◎ 循環水の補充 (月に1度点検)

必ず本体の電源を切った状態で精製水または蒸留水を補充して下さい。



本体右側全面の小窓をプラスドライバーで開けます。ネジはロック式になっているので、半回転程度で外れます。この時、ネジは無くさない様に大切に保管して下さい。



蓋を外すと、本体コネクタ (給水口) が現れます。



循環水のレベルは、機械を揺らすと微かに液面が振れて確認することができます。(大変確認しづらい為ご注意ください) 左の赤線の位置より水位が低ければ補充が必要です。



付属品のホース (先端に専用コネクタ付) を本体コネクタに接続して循環水の補充を行います。



この時カチッと音がするまでしっかりコネクタを押し込んで下さい。



循環水の補充を行います。



補充が完了したら、本体コネクタ側のシルバーの取っ手部分を本体側に押しホースを取ります。蓋を閉めれば循環水の補充の完了です。